

GoTo®
FLUORESCENTE
ADHESIVO ORTODÓNTICO FOTOPOLIMERIZABLE
REF GTP (jeringa de empuje) o REF GTT (Puntas)

INDICACIONES DE USO: GoTo® está diseñado para el uso como adhesivo fotopolimerizable para brackets.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación de los dientes: Realice la profilaxis de la superficie del esmalte con 1st & Final®, enjuague y seque bien.


Grabado: Aplique el agente grabador en toda el área que debe cementar. Deje 30 segundos para el grabado. Enjuague y seque bien.

Aplicación del Primer: Aplique una capa de Assure Plus y seque con aire.

Aplicación de la pasta al bracket: Aplique el adhesivo a la base del bracket y extiéndalo en la malla del bracket. Aplique el bracket a la superficie del diente preparado. Fotopolimerice el adhesivo a poca distancia durante 10 segundos*. Nota: GoTo será fluorescente si se expone a luz negra

Descementado del bracket y del adhesivo:

Para retirar GoTo™ use un cortador de ligaduras para sujetar el adhesivo en la superficie de contacto del bracket/esmalte y retirar el bracket del diente. Los restos de material pueden retirarse con una fresa del Sistema de Acabado Renew® y con la punta 383 del Sistema de Acabado Renew®.

 **PRECAUCIONES:** Las resinas no polimerizadas pueden provocar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si se instila accidentalmente en el ojo, enjuague con abundante agua y obtenga atención médica de inmediato. Contacto con otros tejidos: enjuague el área de derrame inmediatamente con abundante agua durante varios minutos. Evite la colocación de agentes de grabado en los tejidos blandos.



El uso de luces UV, halógenas y lámparas LED para polimerización puede estar asociado con daño ocular. El paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras debidamente diseñadas cuando utilicen estos dispositivos de fotopolimerización.



LIMITACIÓN DE TEMPERATURA: Conserve a temperatura ambiente (15-30 °C.)

GARANTÍA: Reliance Orthodontic Products, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que surjan del uso o de la incapacidad para usar los productos como se describe. Antes de usar el producto, es responsabilidad del usuario determinar si es adecuado para el uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con ello.

Venta bajo receta: Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo se realice solo a través de un profesional odontológico o por indicación de este.



Escanee para
obtener información
adicional



RELIANCE[®]
ORTHODONTIC
PRODUCTS

Fabricado en los EE.UU.

EC

REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haya
Los Países Bajos



1540 West Thorndale Ave., Itasca, IL 60143 U.S.A.
1-800-323-4348 · www.RelianceOrthodontics.com

Patrocinador en Australia:
Emergo Australia
201 Sussex St.
Darling Park
Tower II, Level 20,
Sydney, NSW 2000
Australia

MD

Visite nuestra nueva
plataforma de aprendizaje
Reliance U
www.RelianceU.tech