

## EZ Bow Instrucciones

Items #AR540250, AR560150 – AR560950



Instale el láser, el nivelador y la bandeja de registro en EZ Bow (arco), asegurándose de que la bandeja de índice esté nivelada.



Evalue al paciente por sonrisa inclinada o plano inclinado de oclusión. Aplique más material de reg de mordida a las áreas altas para capturar el registro de mordida. ¡No gire el arco EZ! Manténgalo plano y alineado en la línea media facia.




Aplique accu-bite o compuesto de registro de mordida a la bandeja de registro en las áreas molar y bi-cúspide (posiciones 9, 11, 1 y 3 del reloj).




El paciente debe estar sentado o de pie en posición vertical, con la cabeza nivelada en preparación para el EZ Bow.



Coloque el arco frente a la cara para ayudar a identificar el nivel sagital y anterior-posterior. Haga que el paciente cierre los ojos, encienda el láser y colóquelo en la línea media facial. El paciente ahora puede abrir los ojos.

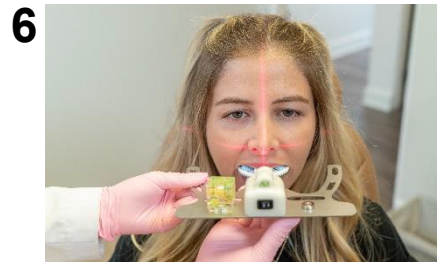

Inserte EZ Bow en la boca, levante hacia arriba en el maxilar, con los incisivos centrales presionados contra el tope vertical frontal. EZ Bow(arco) debe ser apoyado por las manos del médico. el paciente no debe moder el arco.

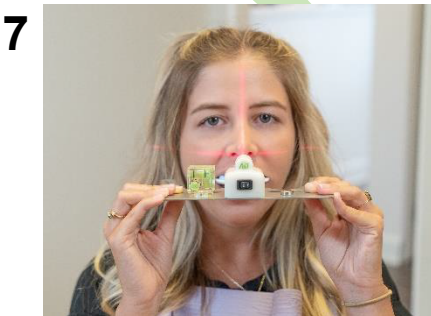

Una vez completado, haga que el paciente apoye el arco con los dedos. Retroceda y tome fotografías según crea conveniente.



Retire el arco del paciente y retire la bandeja del índice del arco. Escriba el nombre del paciente en la parte inferior de la bandeja de registro. La bandeja se puede quitar agarrando los lados de la bandeja y jalando.



Alternativamente, la bandeja de registro se puede quitar colocando sobre una superficie plana y aplicando una ligera presión hacia abajo sobre EZ Bow.