

INDICACIONES DE USO:

Ultra Band-Lok® está diseñado para el uso como cemento de banda ortodóntica y para reconstrucciones oclusales.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cementado de bandas:

- Realice la profilaxis completa de los dientes con 1st & Final®. Enjuague, seque y aisle.
- No es necesario realizar el grabado ácido del esmalte para cementar las bandas. Sin embargo, se recomienda para cementar aparatos de alta tensión.
- Aplique una gota de Ultra Band-Lok® en el interior de la banda.
- Posicione la banda, limpie cualquier exceso de producto. Coloque la punta de la luz bien cerca de la superficie oclusal del diente. Muévala en círculos lentamente alrededor de la parte superior de la banda y fotopolimerice durante 30 segundos. En este punto, el cemento está completamente polimerizado, lo que permite una colocación inmediata.

Si se usan las jeringas Luer-Loc:

- Desenrosque y retire la tapa negra de almacenamiento de la punta de la jeringa.
- Coloque la punta y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la punta quede fija en su posición.
- Cuando haya finalizado el procedimiento, retire la punta y vuelva a colocar la tapa negra de almacenamiento para mantener el Ultra Band-Lok® protegido de la luz.

Aplicación en la reconstrucción oclusal: Realice la profilaxis, enjuague y seque. Grabe la superficie oclusal durante 30 segundos, luego enjuague, seque y aisle. Aplique Ultra Band en la cantidad y forma requerida para la superficie oclusal. Fotopolimerice durante 20 segundos. Nota: en lugar del grabado con ácido fosfórico se puede utilizar un primer self-etch.

Importante: *Ultra Band-Lok®* es sensible a la luz ambiental. Cubra el producto no polimerizado expuesto hasta que el producto esté listo para la fotopolimerización.



PRECAUCIONES: Las resinas no polimerizadas pueden provocar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Contacto con otros tejidos: enjuague el área de derrame inmediatamente con abundante agua durante varios minutos.



El uso de luces UV, halógenas y lámparas LED para polimerización puede estar asociado con daño ocular. El paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras debidamente diseñadas cuando utilicen estos dispositivos de fotopolimerización.



LIMITACIÓN DE TEMPERATURA: Conserve la versión con flúor refrigerada (2-8 °C). Sensible a la luz. Evite el exceso de temperatura. Deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.



Consérvese a temperatura ambiente en la versión sin flúor (15-30 °C).



Sensible a la luz.

INFORMACIÓN PARA NUEVOS PEDIDOS:

Jeringas con flúor: Ref #UBLBPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Azul

Ref# UBLBPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Natural

Ref# LLUBLBP para la jeringa Luer-Loc Ultra Band-Lok® Tono azul con 10 puntas

Ref# LLUBLP para la jeringa Luer-Loc Ultra Band-Lok® Tono natural con 10 puntas

Jeringas sin flúor: Ref #NFUBLBPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Azul sin flúor

Ref # NFUBLBPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Natural sin flúor

Ref# NFLUBLBP para la jeringa Luer-Loc Ultra Band-Lok® Tono azul sin flúor con 10 puntas

GARANTÍA: Reliance Orthodontic Products Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que surjan del uso o de la incapacidad para usar los productos como se describe. Antes de usar el producto, es responsabilidad del usuario determinar si es adecuado para el uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con ello.

Venta bajo receta: Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo se realice solo a través de un profesional odontológico o por indicación de este.



RELIANCE®

**ORTHODONTIC
PRODUCTS**

1540 West Thorndale Ave., Itasca, IL 60143 U.S.A.
1-800-323-4348 · www.RelianceOrthodontics.com

EC

REP

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20
2514 AP La Haya
Los Países Bajos

Patrocinador en Australia:

Emergo Australia
201 Sussex St. Darling Park
Tower II, Level 20,
Sydney, NSW 2000 Australia



Escanee para obtener más
información

MD

Visite nuestra nueva
plataforma de aprendizaje
Reliance U
www.RelianceU.tech

Fabricado en los
EE.UU.